

REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL

Ooggel voor honden en katten

GEBRUIKSAANWIJZING

WAT IS REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL?

REMEND® Cornea verzorgende ooggel is een verzorgende gel die ter bevochtiging van de ogen van honden en katten kan worden gebruikt. Hyasent-S (gecrosslinkt hyaluronzuur) biedt de optimale omgeving voor gemakkelijkere celvernieuwing. Het bevordert de weefselregeneratie van het hoornvlies en vermindert het gevaar op littekenvorming. REMEND® Cornea verzorgende ooggel bevat geen conserveringsmiddelen.

WAARVOOR WORDT REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL GEBRUIKT?

REMEND® Cornea verzorgende ooggel kan worden gebruikt ter bevochtiging van de ogen van honden en katten.

HOE WERKT REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL?

Hyasent-S (gecrosslinkt hyaluronzuur) bevordert een snelle weefselregeneratie van het hoornvlies bij honden en katten.

WAARUIT BESTAAT REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL?

REMEND® Cornea verzorgende ooggel bevat de volgende bestanddelen:

Water, 0,75% hyasent-S (gecrosslinkt hyaluronzuur), 0,8% natriumchloride, 0,14% dinatriumfosfaat, 0,02% kaliumchloride, 0,03% kaliumfosfaat

HOE WORDT REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL TOEGEPAST?

1. Om hygiënische redenen handschoenen gebruiken.
2. Verwijder voorzichtig de dop van de houder.
3. Til met de hand de kop van het dier omhoog zodat de ogen naar boven kijken.
4. U kunt 2-3 x per dag 1-2 druppels rechtstreeks op het hoornvlies van het dier aanbrengen. Door de natuurlijke beweging van het ooglid wordt de gel over het gehele oogoppervlak verdeeld.
5. De tip van de houder niet in aanraking laten komen met andere oppervlakken, om verontreiniging te voorkomen.
6. Doe na gebruik de dop weer op de houder.



REMEND® Cornea verzorgende ooggel is geen diergeneesmiddel. Bij een oogaandoening of oogletsel dient men een dierenarts te raadplegen.

HOE VAAK WORDT REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL TOEGEPAST?

Tenzij anders aanbevolen, dient men REMEND® Cornea verzorgende ooggel 2-3 keer per dag met 1-2 druppels per oog aan te brengen.

WAAROP MOET MEN LETTEN BIJ HET GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN ANDERE OOGPRODUCTEN?

Let op dat er ten minste 10 minuten tijd zit tussen het gebruik van beide producten. Gebruik oogzalf pas nadat u oogdruppels of - gel heeft toegepast.

HOE WORDT REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL BEWAARD EN WAT IS DE HOUDBAARHEID?

REMEND® Cornea verzorgende ooggel is tot het aanbreken van de verpakking steriel en kan na opening bij correct gebruik ten minste 7 dagen worden gebruikt. Bij kamertemperatuur bewaren en beschermen tegen warmtebronnen. Bij het bewaren in de koelkast moet men REMEND® Cornea verzorgende ooggel eerst op kamertemperatuur laten komen voorafgaand aan gebruik. REMEND® Cornea verzorgende ooggel niet invriezen!

HOE WORDT REMEND® CORNEA VERZORGENDE OOGGEL GELEVERD?

De verpakking bevat 6 x 3 ml druppelflesjes incl. gebruiksaanwijzing.

AANWIJZING:
ALLEEN VOOR GEBRUIK BIJ DIEREN.

GEFABRICEERD VOOR:

B/L Bayer SA-NV,
J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem (Machelen)

NL Bayer BV, Energieweg 1, NL-3641RT Mijdrecht

FABRIKANT: SentrX Animal Care, 391 Chipeta Way, Suite G, Salt Lake City, UT 84108, VS

Remend® is een handelsmerk van SentrX Animal Care Inc., Bayer en Bayer Kreuz zijn handelsmerken van Bayer AG.



REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE

Gel ophtalmique pour chiens et chats

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

QU'EST-CE QUE REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE

REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée est un gel de soin pouvant être utilisé pour humidifier les yeux des chiens et des chats. L'hyasent-S (acide hyaluronique réticulé) offre l'environnement optimal favorisant le renouvellement cellulaire. La régénération tissulaire de la cornée est favorisée et le risque de cicatrisation réduit. REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée ne contient aucun conservateur.

DANS QUEL CAS EST UTILISÉ REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE ?

REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée peut être utilisé pour humidifier les yeux des chiens et des chats.

COMMENT AGIT REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE ?

L'hyasent-S (acide hyaluronique réticulé) favorise une régénération tissulaire rapide de la cornée chez les chiens et les chats.

QUELLE EST LA COMPOSITION DE REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE ?

REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée contient les ingrédients suivants :
Eau, hyasent-S (acide hyaluronique réticulé) 0,75 %, chlorure de sodium 0,8 %, phosphate disodique 0,14 %, chlorure de potassium 0,02 %, phosphate de potassium 0,03 %.

COMMENT UTILISER REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE ?

1. Pour des raisons d'hygiène, enflevez des gants.
2. Enlevez prudemment le capuchon du flacon.
3. À l'aide d'une main, soulevez la tête de l'animal de manière à ce qu'il regarde vers le haut.
4. Appliquez 1 à 2 gouttes, 2 à 3x par jour, directement sur la cornée de l'animal. Le mouvement naturel de la paupière répartit le gel sur toute la surface de l'œil.
5. Afin d'éviter toute contamination, l'extrémité du flacon ne doit pas toucher la cornée ni aucune autre surface.
6. Après l'utilisation, remplacez le capuchon sur le flacon.



REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée n'est pas un médicament vétérinaire. Vous devez consulter un vétérinaire en cas d'affection ou de lésion oculaire.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE D'APPLICATION DE REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE ?

Sauf indication contraire, REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée doit être appliqué 2 à 3x par jour à raison d'1 à 2 gouttes par œil.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS D'UTILISATION SIMULTANÉE D'AUTRES PRODUITS OCULAIRES

Attendre un délai d'au moins 10 minutes entre l'application des deux produits. L'administration d'un onguent ophtalmique doit toujours s'effectuer après l'application d'un collyre ou d'un gel.

COMMENT CONSERVER REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE ET QUELLE EST SA DURÉE DE CONSERVATION ?

REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée est stérile jusqu'à l'ouverture du flacon. En cas d'utilisation correcte, il peut être utilisé pendant au moins les 7 jours suivant l'ouverture du flacon. A conserver à température ambiante, à l'abri de toute source de chaleur. En cas de conservation au réfrigérateur, REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée doit être amené à température ambiante avant l'utilisation. Ne pas congeler REMEND® Gel ophtalmique Soins Cornée !

PRÉSENTATION DE REMEND® GEL OPHTALMIQUE SOIN CORNÉE

La boîte contient 6 flacons de 3 ml de collyre et une notice d'utilisation.

REMARQUE : USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT.

FABRIQUÉ POUR:

B/L Bayer SA-NV,
J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem (Machelen)

NL Bayer BV, Energieweg 1, NL-3641RT Mijdrecht

FABRICANT : SentrX Animal Care, 391 Chipeta Way, Suite G, Salt Lake City, UT 84108, États-Unis

Remend® est une marque de SentrX Animal Care Inc., Bayer et la croix Bayer sont des marques de Bayer AG.

